

PowerMic - Reinigung und Desinfektion

Wichtig: Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das PowerMic vom PC oder Laptop getrennt ist. Achten Sie besonders darauf, dass keine Flüssigkeit in das PowerMic gelangt.

Nuance gibt folgende Empfehlung für die Reinigung der PowerMics.

Allgemeine Desinfektion

Die Nuance PowerMics können nicht tiefengereinigt werden, da sie nicht spritzwassergeschützt sind. Sie können jedoch mit einem Desinfektionstuch abgewischt werden. Wir empfehlen die Verwendung eines Clorox- oder Lysol-Tuchs. Das PowerMic hat eine antimikrobielle Oberfläche und wurde im Rahmen unserer Qualitätstests sowohl mit Clorox- als auch mit Lysol-Tüchern getestet.

Klebrige Knöpfe

Verwenden Sie ein mit Desinfektionsreiniger getränktes Wattestäbchen. Halten Sie den zu reinigenden Knopf gedrückt, ohne ihn abzubauen und reinigen Sie die Kanten des Knopfes, während er gedrückt ist.

Allgemeine Reinigung

Wischen Sie das PowerMic mit einem Desinfektionsreiniger ab und stellen Sie sicher, dass sich in keiner der Spalten noch Schmutz befindet.

Der Gerätehersteller empfiehlt die Verwendung folgender Reiniger, die für die PowerMics sicher verwendet werden können:

- Lysol
- Clorox
- Bleiche
- Kochsalzlösung
- Wasserstoffperoxid
- Isopropylalkohol

Von der Verwendung folgender Reiniger wird abgeraten:

- T-Spray
- Aceton
- Methyläthylketon (MEK)

