

PowerMic Rengørings- og desinfektionsguide

Vigtigt: Vær sikker på, at PowerMic mikrofonen ikke er tilsluttet i forbindelse med rengøringen. Vær ekstremt påpasselig med ikke at få flydende væsker ind i udstyret.

Nuance giver følgende guide til rengøring af PowerMic udstyr.

Generel desinfektion.

Da PowerMic udstyret ikke er designet til ekstrem rengøring, hvor væsker eventuelt vil kunne komme ind i udstyret, anbefales en Grundig aftørring med desinficerende klude beregnet til formålet. PowerMic mikrofonen har en antimikrobiel overflade som er testet i forbindelse med godkendelse af udstyret.

Snavsede knapper

Uden at adskille udstyret, kan der anvendes en vatpind med desinfektionsmiddel, til at rengøre omkring knapperne mens de trykkes ned.

Generel rengøring

Brug et desinficerende rengøringsmiddel og en klud til aftørring af udstyret, og vær sikker på ikke at overse snavs i alle revner.

Forhandleren anbefaler følgende rengøringsmidler til sikker rengøring af udstyret:

Sikkert at anvende:

- Brintoverilte
- Isopropylalkohol

Anvend ikke:

- T-Spray
- Acetone
- Methyl Ethyl Ketoner (MEK)

