

# Recomendaciones para la Limpieza y Desinfección de el micrófono PowerMic

**Importante:** Antes de limpiarlo asegúrese de que el PowerMic está desconectado. Sea muy cuidadoso para evitar que entre líquido dentro del PowerMic.

Nuance ofrece las siguientes recomendaciones a la hora de limpiar micrófonos PowerMic.

## Desinfección General

Aunque el PowerMic no se ha diseñado para resistir una limpieza en profundidad donde los líquidos puedan entrar en el dispositivo, se puede limpiar con toallitas desinfectantes, por ejemplo del tipo Clorox o Lysol. El PowerMic tiene una superficie antimicrobiana y ha sido testado con toallitas Clorox y Lysol en nuestro proceso de calificación.

## Botones Pegajosos

Para limpiar los botones sin tener que desmontar el PowerMic, use un bastoncillo de algodón con limpiador desinfectante y limpie alrededor de los bordes de los botones sin pulsarlos.

## Limpieza General

Use un limpiador desinfectante en el PowerMic para limpiar el micrófono. Asegúrese de que no quedan residuos en ninguna de las ranuras.

El fabricante nos ha recomendado los siguientes tipos de limpiadores, los cuales se pueden usar con seguridad en el PowerMic:

### Es Seguro su uso:

- Lysol
- Clorox
- Bleach
- Saline
- Hydrogen Peroxide
- Isopropyl alcohol

### NO USAR:

- T-Spray
- Acetone
- Methyl Ethyl Ketone (MEK)

