



Instrucciones de limpieza de PowerMic 4

Para trabajar con higiene en la sanidad

Índice

3 Introducción

- Trabajar con higiene es ahora más importante que nunca
- La protección de Nuance

3 PowerMic protege 4 al personal sanitario gracias al trabajo con higiene

- Desinfección más eficaz
- Carcasa de superficie lisa

4 Limpieza y desinfección de la superficie

- Precauciones
- Toallitas húmedas
- Desinfectantes líquidos
- Otros desinfectantes



Introducción

No cabe duda de que un profesional sanitario está más expuesto que un trabajador de oficina a riesgos para la salud, que abarcan desde la radiación hasta enfermedades infecciosas. Como muchos factores quedan fuera del control personal, los hospitales insisten en la importancia de prevenir infecciones con medidas de higiene para las manos y superficies.

Trabajar con higiene es ahora más importante que nunca

Esterilizar con eficacia las herramientas y superficies que puedan estar contaminadas es tan importante, sino más, como requerir que los empleados se laven y desinfecten las manos habitualmente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que usar «superficies fácilmente descontaminables» es un factor importante a la hora de determinar el nivel de seguridad en la sanidad.

La protección de Nuance

PowerMic 4 de Nuance se suministra con una carcasa adecuada para entornos médicos. Su superficie permite tomar medidas eficaces para desinfectar el equipo.

PowerMic protege 4 al personal sanitario gracias al trabajo con higiene

Desinfección más eficaz

PowerMic 4 puede limpiarse y desinfectarse íntegramente con agentes de limpieza antimicrobianos que no alteren sus propiedades singulares.

Recomendamos usar paños de limpieza específicos para entornos médicos, como los pañuelos Bacillol 30, por ejemplo.

Carcasa de superficie lisa

Además, la superficie es lo más lisa posible para evitar que proliferen gérmenes y hongos en sus huecos. De este modo, los desinfectantes pueden penetrar en todas las zonas de la superficie y combatir los gérmenes eficazmente.

Limpieza y desinfección de la superficie

A continuación, se ofrece un resumen de posibles soluciones para limpiar y desinfectar la superficie.

Precauciones

- Compruebe que el equipo esté totalmente desconectado del PC antes de proceder a la limpieza.
- Durante la limpieza, evite que penetre líquido en el equipo, ya que podría funcionar incorrectamente hasta que no se evapore dicho líquido.



Toallitas húmedas

Lo ideal es utilizar toallitas húmedas adecuadas, tales como:

Pañuelos Bacillo	Toallitas Bacillo	Pañuelos Mikrobac
		
<p>Los pañuelos Bacillo® son toallitas desinfectantes listas para usar, que permiten desinfectar equipos sanitarios y superficies resistentes al alcohol con rapidez y comodidad.</p>	<p>Las toallitas Bacillo® son adecuadas para desinfectar productos sanitarios y superficies resistentes al alcohol de forma rápida.</p>	<p>Los pañuelos Mikrobac® son adecuados para limpiar y desinfectar productos sanitarios y superficies sensibles con comodidad.</p>

Para obtener más información, visite la web de Bode Chemie GmbH:
<http://www.bode-chemie.com/>



Desinfectantes líquidos

Los desinfectantes líquidos que se mencionan a continuación deben aplicarse sobre un paño para efectuar la limpieza.

Bacillol AF	Espuma Bacillol 30	Sterillium
		
<p>Desinfectante rápido a base de alcohol con amplio espectro de actividad. Se seca sin dejar residuos.</p>	<p>La espuma Bacillol® 30 es idónea para desinfectar rápidamente superficies sensibles al alcohol, tales como pantallas, teclados y paneles de control de equipos portátiles y fijos.</p>	<p>Ideal para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos por fricción, no requiere lavado ni agua. Para todas las zonas relevantes para la higiene.</p>

Para obtener más información, visite la web de Bode Chemie GmbH:
<http://www.bode-chemie.com/>



Otros desinfectantes

Si usa otros desinfectantes a base de alcohol, asegúrese de que contengan los ingredientes siguientes:

- Etanol para la desinfección (graduación del 76,9 % al 81,4 %)
- Isopropanol para la desinfección (graduación del 70 %)

Importante:

Nuance no puede garantizar que no se produzcan daños en el equipo si se utilizan otras sustancias a base de alcohol.

Antes de utilizar el desinfectante, pruébelo en un lugar poco visible del equipo para comprobar que la limpieza no dañe la superficie de la carcasa ni los gráficos impresos.

Nuance rechaza toda responsabilidad derivada del mal uso de los productos de limpieza.