

# Consignes de nettoyage et de désinfection PowerMic

**Important : assurez-vous que le PowerMic est débranché avant de le nettoyer. Faites très attention à ne pas introduire de liquide à l'intérieur du PowerMic.**

Nuance a fourni les directives suivantes sur le nettoyage des appareils PowerMic.

## Désinfection générale

Bien que le microphone PowerMic ne soit pas conçu pour un nettoyage en profondeur où des fluides pulvérisés pourraient entrer, il peut être essuyé avec un désinfectant. Une recommandation spécifique consiste à utiliser une lingette Clorox ou Lysol. Le PowerMic a une surface antimicrobienne et a été testé à l'aide de lingettes Clorox et Lysol dans le cadre de nos tests de qualification.

## Boutons collants

Pour nettoyer sans démontage, utilisez un coton-tige avec un nettoyant désinfectant et nettoyez autour des bords du bouton pendant qu'il est enfoncé.

## Nettoyage général

Utilisez un nettoyant désinfectant sur le PowerMic pour essuyer l'appareil et assurez-vous qu'il n'y a pas de débris dans les crevasses.

Le fabricant de l'appareil a fourni les directives suivantes concernant les types de nettoyants pouvant être utilisés en toute sécurité sur les appareils PowerMic :

### Utilisables sans danger :

- Lysol
- Clorox
- Eau de Javel
- Solution saline
- Eau oxygénée
- Alcool isopropylique

### NE PAS UTILISER :

- T-Spray
- Acétone
- Méthyléthylcétone (MEC)

