

Linee guida per la pulizia e la disinfezione di PowerMic

Importante: assicurarsi che PowerMic sia scollegato prima della pulizia. Prestare estrema attenzione a non introdurre liquidi all'interno di PowerMic

Nuance ha fornito le seguenti linee guida sulla pulizia dei dispositivi PowerMic.

Disinfezione generale

L'unità del dispositivo PowerMic non è progettata per una pulizia profonda perché eventuali liquidi spruzzati entrerebbero nell'unità. Comunque il dispositivo può essere pulito con un disinfettante. Una raccomandazione specifica è quella di utilizzare una salvietta disinfettante.

PowerMic ha una superficie antimicrobica ed è stato testato utilizzando sia le salviette Clorox che quelle di Lysol come parte del nostro test di qualificazione.

Bottoni appiccicosi

Per pulire senza smontare, utilizzare una punta a Q con un detergente disinfettante e pulire intorno ai bordi del pulsante mentre questo è premuto.

Pulizia generale

Utilizzare un detergente disinfettante su PowerMic per pulire il dispositivo e assicurarsi che non vi siano detriti in nessuna delle fessure.

Il produttore del dispositivo ha fornito le seguenti linee guida relative ai tipi di detergenti che possono essere utilizzati in sicurezza sui dispositivi PowerMic:

Sicuri per l'uso:

- Lysoform
- Candeggina
- Perossido di idrogeno
- Alcool isopropilico

NON USARE:

- PI-Spray (a base di QUAT) (Detergente disinfettante per ecografia e mammografia).
- Acetone
- Metil etil chetone (MEK)

