

PowerMic Richtlijnen voor Reiniging en Ontsmetting

Belangrijk: Zorg ervoor dat de PowerMic is losgekoppeld voordat u hem schoonmaakt. Wees uiterst voorzichtig zodat er geen vloeistof in de PowerMic komt.

Nuance geeft de volgende richtlijnen voor het reinigen van de PowerMic apparaten.

Algemene desinfectie

Hoewel de PowerMic microfoon niet ontworpen is voor een dieptereiniging waarbij vloeistoffen in het apparaat zouden komen bij besproeiing, kan het worden afgeveegd met een desinfectiemiddel. Een specifieke aanbeveling is het gebruik van een Clorox- of Lysol-doekje. De PowerMic heeft een antimicrobieel oppervlak en is getest met zowel Clorox- als Lysol-doekjes als onderdeel van onze kwalificatietesten.

Vuile knoppen

Om de knoppen te reinigen zonder demontage, gebruikt u een Q-tip met een desinfecterende reiniger en reinigt u de randen van de knop terwijl deze wordt ingedrukt.

Algemene reiniging

Gebruik een ontsmettingsmiddel om de PowerMic af te vegen en zorg ervoor dat er geen vuil in de spleten zit.

De fabrikant van het apparaat geeft de volgende richtlijnen met betrekking tot de soorten reinigingsmiddelen die veilig kunnen worden gebruikt op de PowerMic apparaten:

Veilig voor gebruik:

- Lysol
- Clorox
- Bleekmiddel
- Zoutoplossing
- Waterstofperoxide
- Isopropylalcohol

NIET GEBRUIKEN:

- T-Spray
- Aceton
- Methyl Ethyl Ketone (MEK)

