

Riktlinjer för rengöring och desinfektering av PowerMic

VIKTIGT: Säkerställ att din PowerMic inte är inkopplad innan du påbörjar rengöringen. Det är extremt viktigt att inget rengöringsmedel kommer in i själva mikrofonen.

Nuance ger följande riktlinjer för rengöring av PowerMic-enheter.

Allmän desinfektering

Trots att enheten inte är designad för omfattande rengöring där hela enheten sänks ner i rengöringsvätskor så går det utmärkt att torka av den med desinfektionsmedel. Enheten har en yta som är naturligt antimikrobiell.

Knappar som fastnar

För att rengöra knapparna utan att demontera hela enheten, använd en tops med desinfektionsmedel och tvätta noga runt kanterna på knapparna samtidigt som du trycker ned knapparna.

Generella råd för rengöring

Använd desinfektionsmedel på hela PowerMic-enheten och torka av den omedelbart. Säkerställ att ingen smuts hamnar i håligheter på enheten.

Tillverkaren rekommenderar följande typer av rengöringsmedel för enheten:

Lämpliga att använda:

- Isopropanol

ANVÄND INTE:

- T-Sprit
- Aceton
- Metyletylketon (MEK)
- Andra ämnen som kan skada plast och gummi

